

Einfache und schnelle Anwendung

1. Messung für die Auswahl der korrekten Größe

PZN	Größe	Knöchelumfang	Wadenumfang	Länge
11558886	Klein	19 - 25 cm	30 - 40 cm	bis 46 cm
11558892	Mittel	23 - 30 cm	35 - 48 cm	bis 53 cm
11558900	Groß	28 - 38 cm	43 - 61 cm	bis 53 cm
16223386	Extragroß	30 - 42 cm	40 - 66 cm	bis 53 cm

2. Auftragen der antimikrobiellen Kompressionsmanschette

Die Manschette kann entweder direkt über die Wundauflagen aufgebracht werden oder es können Schlauchverbände zur Fixierung der Auflagen verwendet werden.



3. Anlegen der gewünschten Kompression

Dehnen Sie die Kompressionsbinde beim Wickeln, so dass aus dem Oval/Rechteck ein Kreis/Quadrat werden und wickeln Sie eine zweite Lage mit 50% Überlappung zur ersten Lage. Wickeln Sie mit diesem Zug und 50% Überlappung das Bein hoch, um eine graduierte Kompression mit 40 mmHg am Knöchel (Kompressionsklasse 3) zu erreichen. **Wickeln Sie nicht mehr als die beiden vorgegebenen Lagen und überdehnen Sie die Binde nicht!** Unter dem Knie die Binde ggf. kürzen und mit den Klettstreifen fixieren. Für zusätzliche Stabilisierung können vom Unterfußbereich über die Ferse sowie an den Knöcheln weitere Klettstreifen angebracht werden.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie im Internet unsere Homepage www.sanaFactor.com, um sich ein detailliertes Video zur korrekten Anwendung des Produktes anzusehen